

Application **ODONTOSCOPE®**



See instructions

Lire attentivement toutes les informations et précautions contenues dans ce manuel. Avant d'utiliser l'application Odontoscope®, assurez-vous d'avoir bien compris la finalité de l'application et ses limitations. Si vous avez des questions, veuillez contacter Odontoscope®. Au cours de l'utilisation du service, l'assistance technique et l'assistance médicale nécessaires seront fournies. En cas de défaillance ou de problème dans l'application, vous pourrez contacter Odontoscope® par le biais de la [messagerie de l'application](#)

Décembre 2025



Odontoscope®



Version 1.1



Marque CE développée en conformité avec le règlement (UE) 2017/745 – MDR pour les dispositifs de classe I



Veuillez lire les instructions d'utilisation fournies avec ce logiciel



Manufacturer
BENOLIEL SIMON FSBD
322, rue Haute
1000 Brussels Belgium

Application **ODONTOSCOPE®**

Manuel d'utilisation de l'application Odontoscope®

L'application Odontoscope® est un logiciel destiné à capturer, structurer et transmettre des images et informations bucco-dentaires obtenues avec le dispositif médical Odontoscope®.


Elle permet au personnel soignant de réaliser une documentation standardisée de l'état bucco-dentaire d'un résident, et de transmettre ces données à un dentiste autorisé afin qu'il réalise lui-même une évaluation clinique à distance (téléexpertise).

L'application n'effectue aucune analyse automatique, ne détecte aucune anomalie, ne fournit aucune recommandation clinique et n'influence pas la décision diagnostique ou thérapeutique.



Toute interprétation clinique est réalisée exclusivement par un professionnel de santé.

Le Système ODONTOSCOPE®

Le dispositif médical

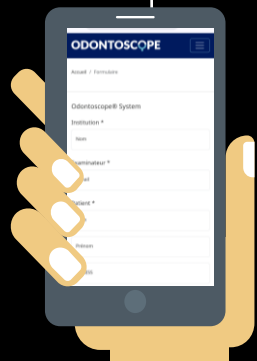

L'application

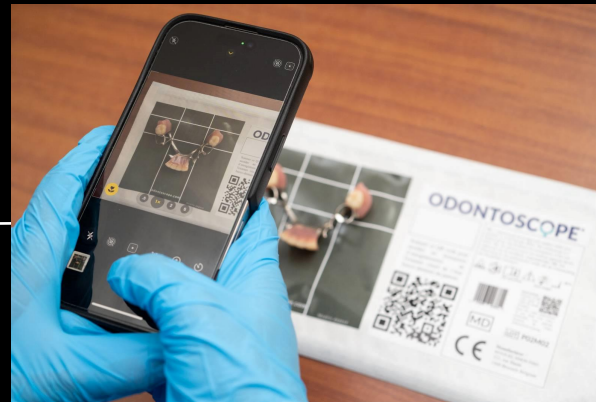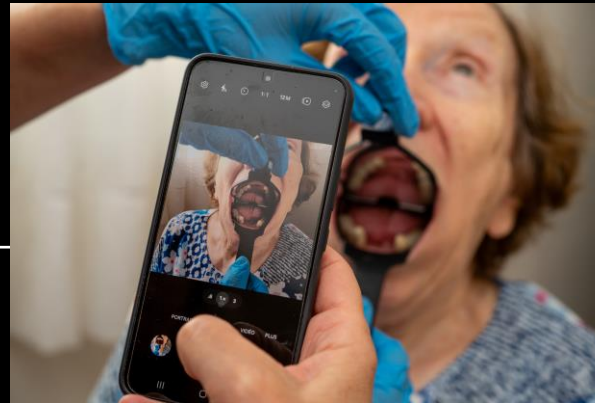

La documentation photo

A photograph of the ODONTOSCOPE report form, titled 'Rapport de contrôle d'un état bucco-dentaire'. The form includes fields for patient information, clinical findings, and recommendations. It features a grid for clinical findings and a section for patient autonomy and hygiene recommendations.


ODONTOSCOPE® Rapport de contrôle d'un état bucco-dentaire			
Bilan bucco-dentaire Suivi d'une plainte bucco-dentaire			
Institution :	Résidence test		
Patient Patient Test	N° NSS 123456789	Examen du 05/02/2025 17:36	
Description de la plainte ou de son suivi Souffrir d'un saignement buccal et de la langue			
Arrière sup	Arrière inf	Langue	Labres
Prothèse sup extrinsèque	Prothèse sup intrinsèque	Prothèse inf extrinsèque	Prothèse inf intrinsèque
Etat bucco-dentaire : à surveiller l'état des dents l'état des gencives l'état de la langue l'état des lèvres l'état des prothèses		Hygiène bucco-dentaire : à améliorer le patient est autonome l'hygiène dents-gencives l'hygiène de la langue l'hygiène des prothèses	
Commentaires et recommandations A revoir dans 3 mois pour une évaluation de la saignée buccale, notamment après le traitement d'accompagnement.			
Analyse par Simon Dentiste		Prochain examen de suivi les 3 mois	





Le rapport de l'état
bucco-dentaire

L'application ODONTOSCOPE®

1. Préparation

1. S'assurer que le résident est installé confortablement et que l'éclairage est suffisant.
2. Ouvrir l'application depuis le QR code présent sur l'emballage de l'Odontoscope® ou à l'URL app.odontoscope.com.
3. Utiliser l'identifiant et le mot de passe communiqué pour vous connecter
4. Vérifier que c'est bien le nom de votre institution qui figure dans le formulaire
5. Renseigner l'identification du patient ; nom, prénom, NISS

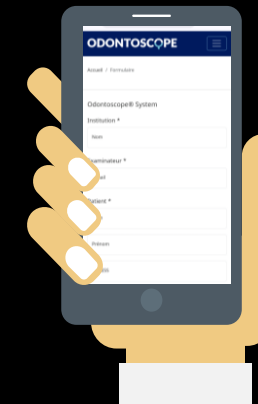

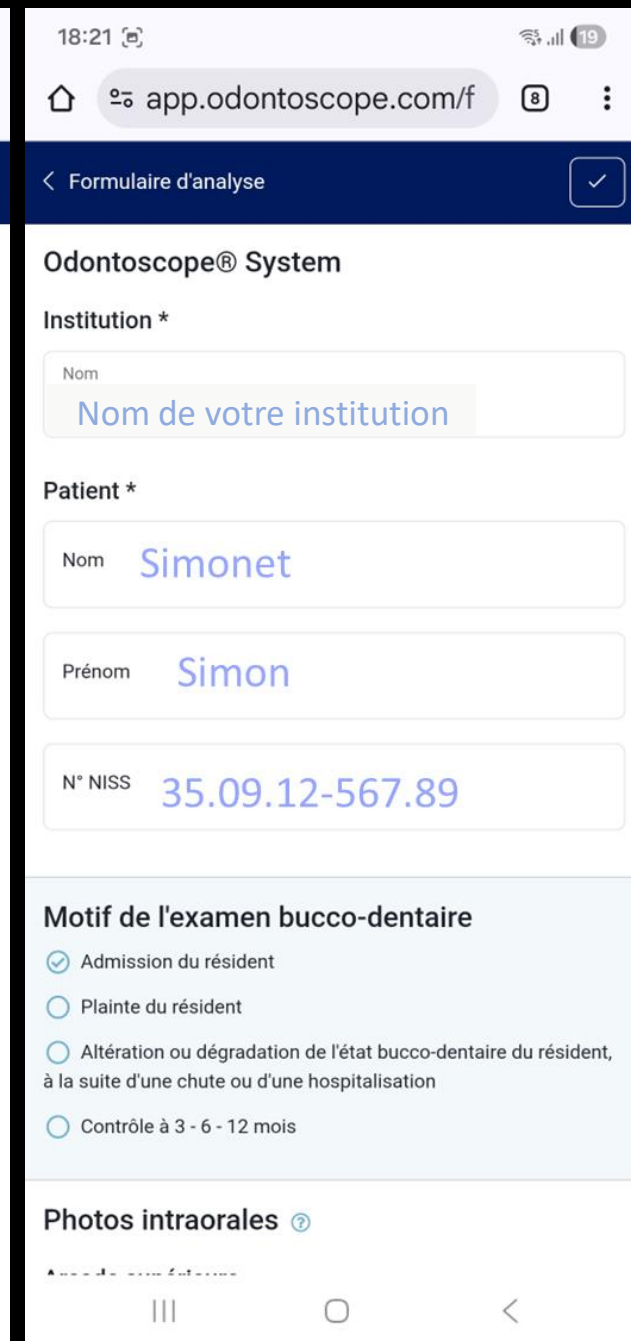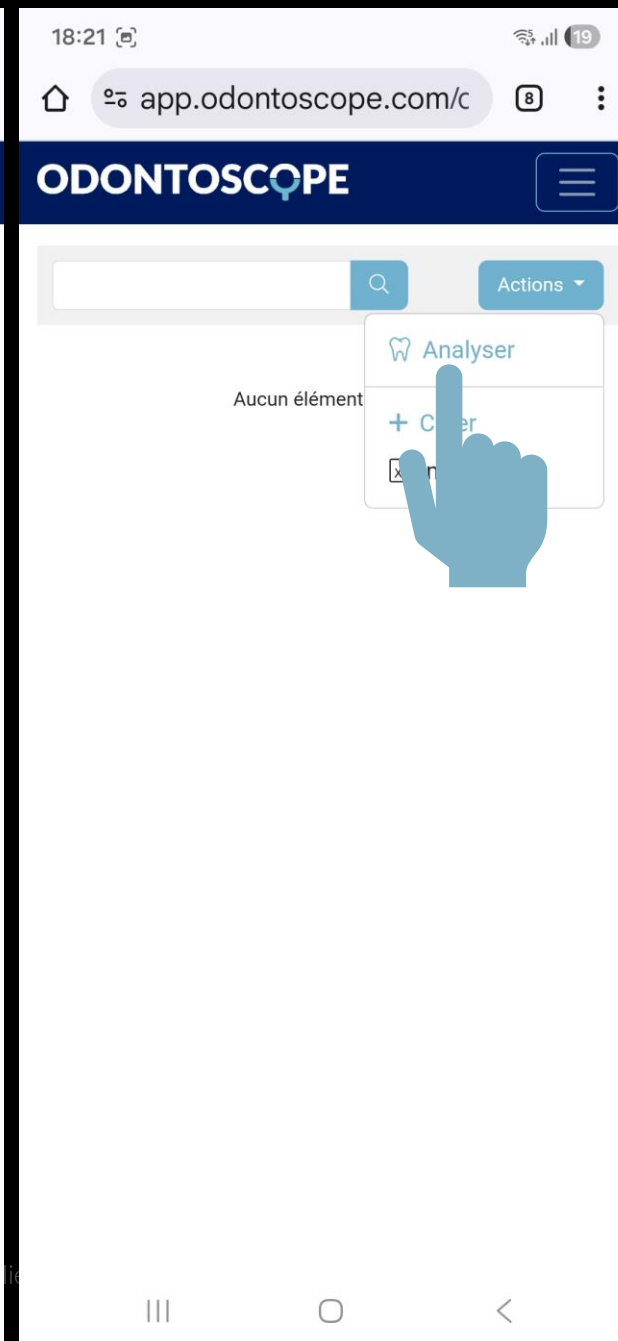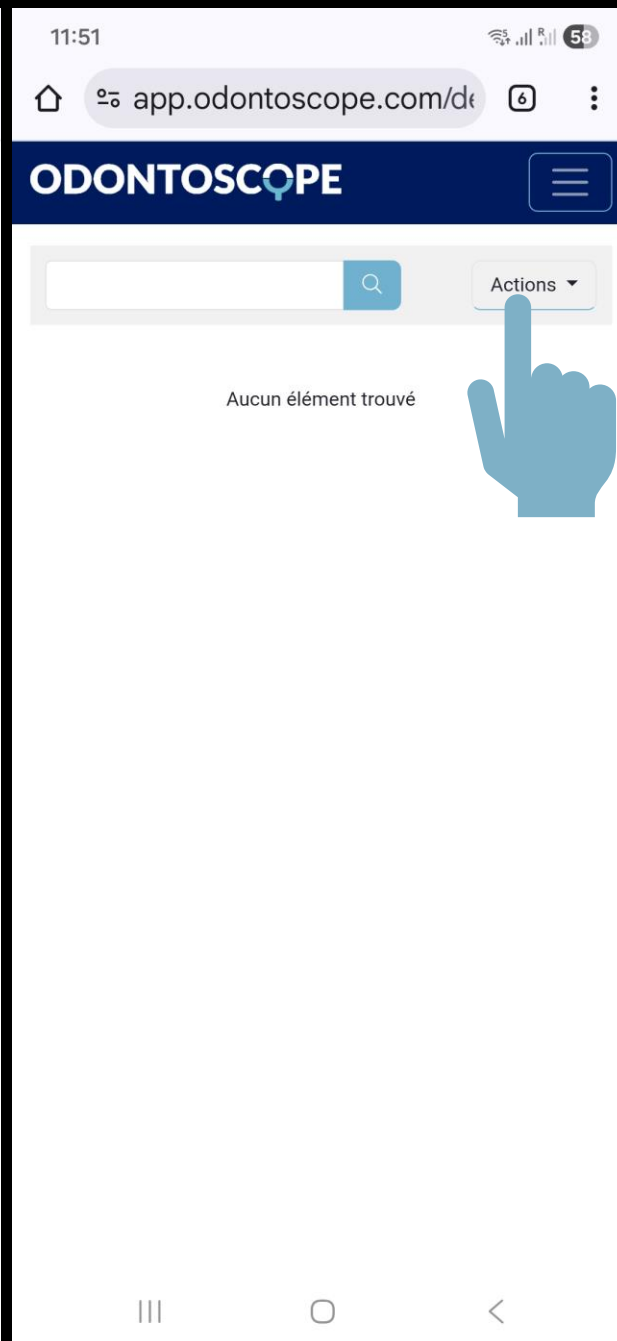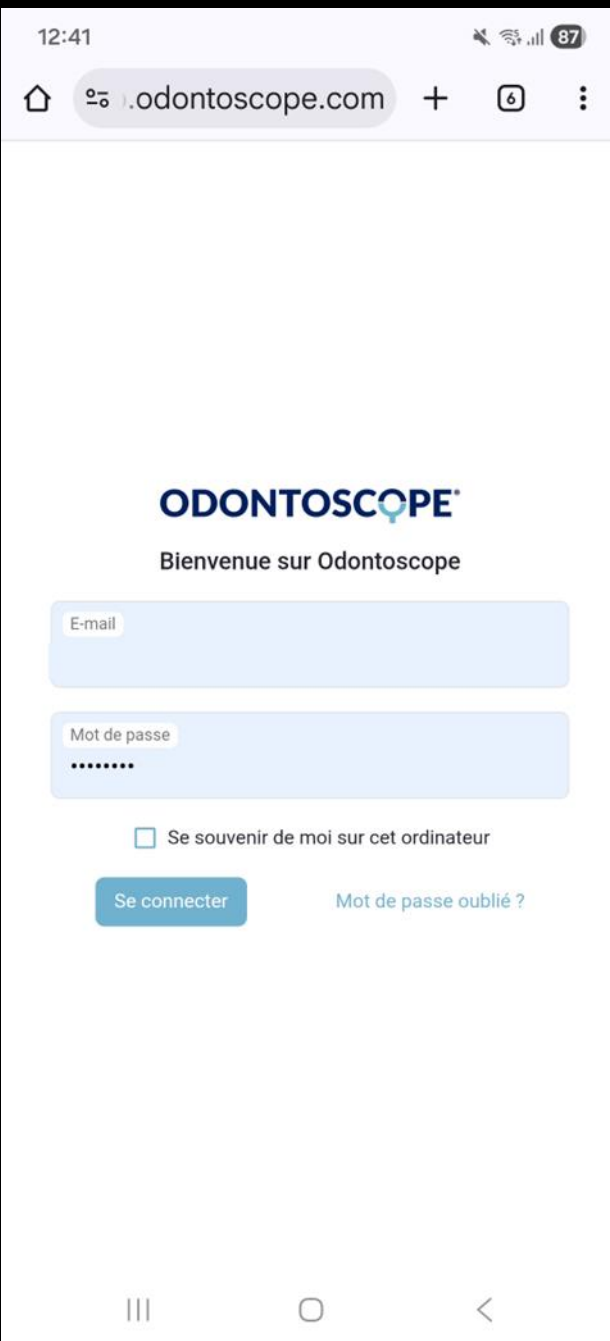

09:02 95

staging.kweetix.com/Odontc

ODONTOSCOPE

Motif de l'examen bucco-dentaire

- ☐ Admission du résident
- ☒ Plainte du résident
- ☐ Altération ou dégradation de l'état bucco-dentaire du résident, à la suite d'une chute ou d'une hospitalisation
- ☐ Contrôle à 3 - 6 - 12 mois

Observations ?

Douleur, sécheresse buccale, ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A Z E R T Y U I O P

Q S D F G H J K L M


W X C V B N

!#1 , < Français (FR) > . Suiv.

2. Choix du formulaire

Sélectionner le type d'examen :

- Admission du résident
- Plainte du résident
- Altération ou dégradation de l'état bucco-dentaire du résident à la suite d'une chute ou d'une hospitalisation
- Contrôle à 3 – 6 – 12 mois
- Ecrire si nécessaire vos commentaires dans le cadre réservé « observations » .

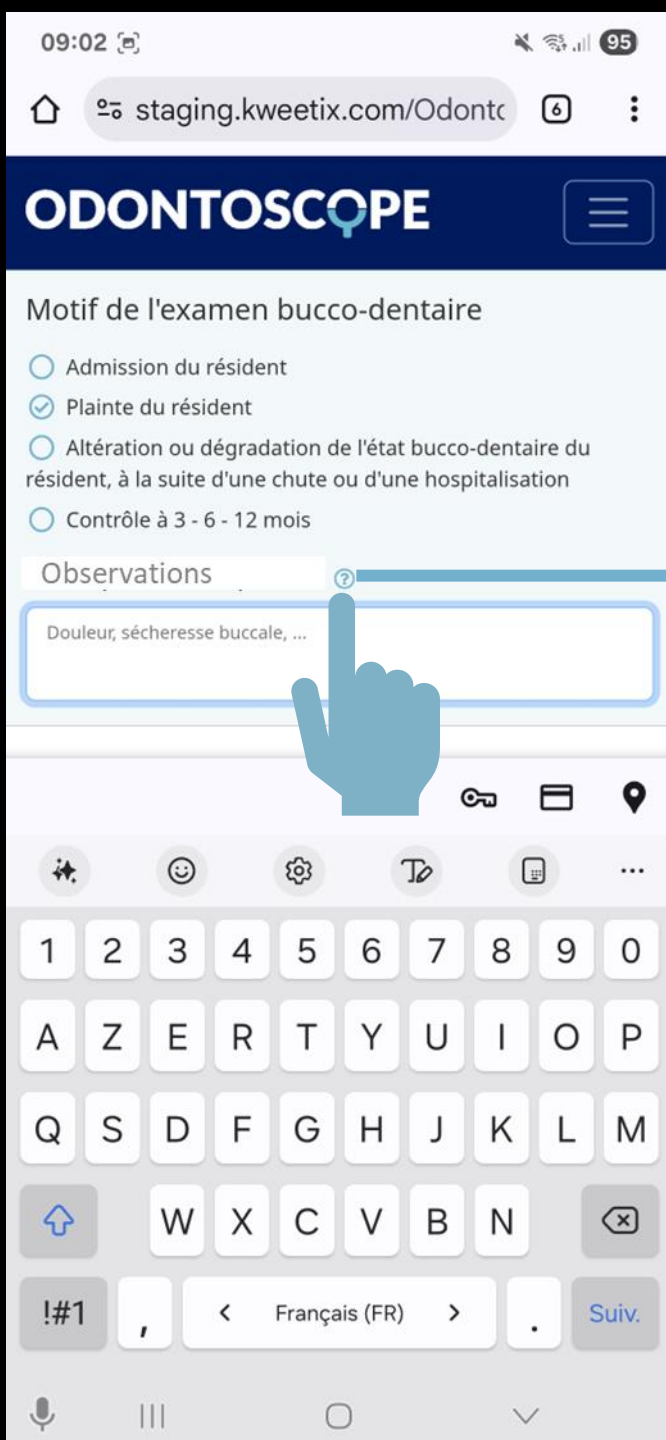

Guides



Comment décrire une plainte bucco-dentaire

© Dr Simon Benoliel





3. Prise de photos

Si cela est possible, utiliser le miroir d'examen Odontoscope® pour écarter les joues et les lèvres et obtenir une vue claire, selon les instructions délivrées par le fabricant.


Prendre les photos selon les vues proposées :

- Arcade supérieure
- Arcade inférieure
- Langue
- Muqueuses : Lèvres ou joues selon la pertinence

2. Si pertinent, prendre les photos des prothèses

- Prothèse supérieure extrados
- Prothèse supérieure intrados
- Prothèse inférieure extrados
- Prothèse inférieure intrados

3. Reprendre une photo si elle n'est pas nette ou insuffisante.

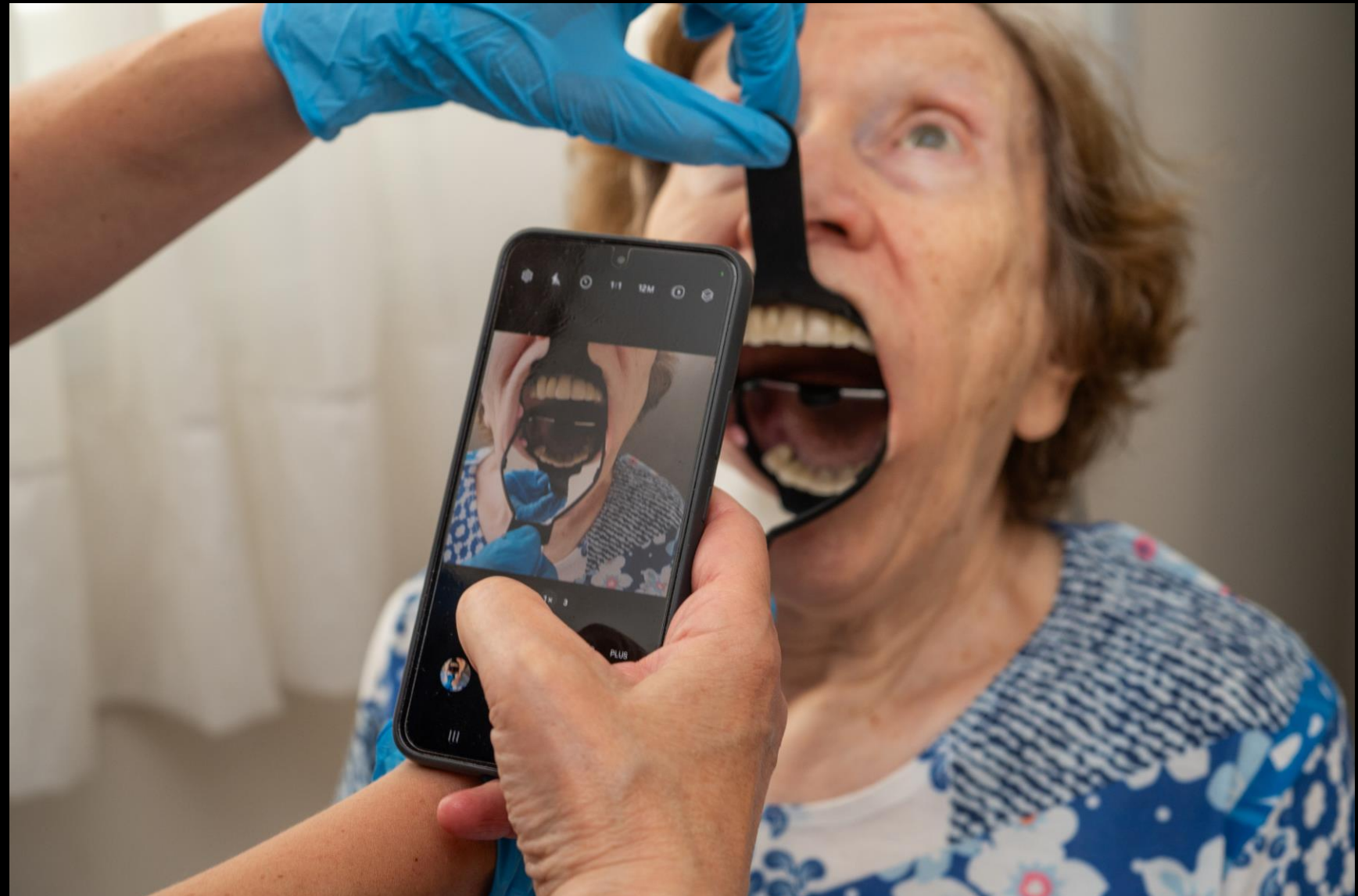



Guides



Comment prendre une photo intraorale

© Dr Simon Benoliel







Optimiser la photo intraorale



Même si la lumière ambiante vous semble suffisante,
toujours utiliser le flash pour les photos intrabuccales



Optimiser la photo intraorale

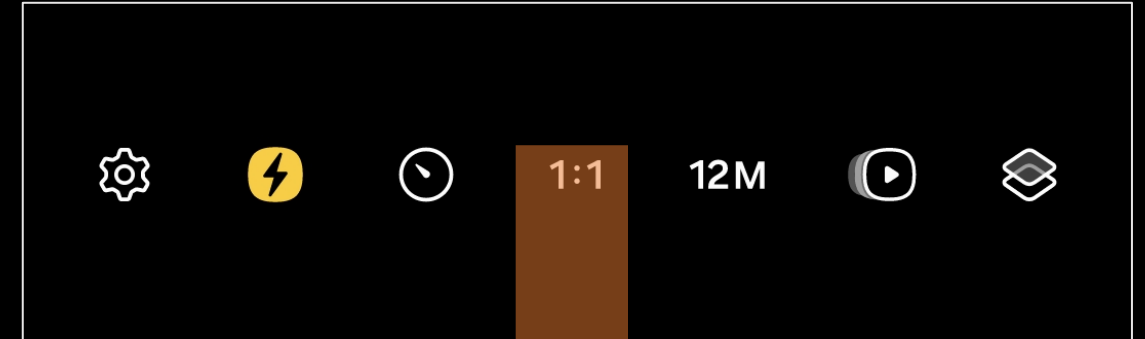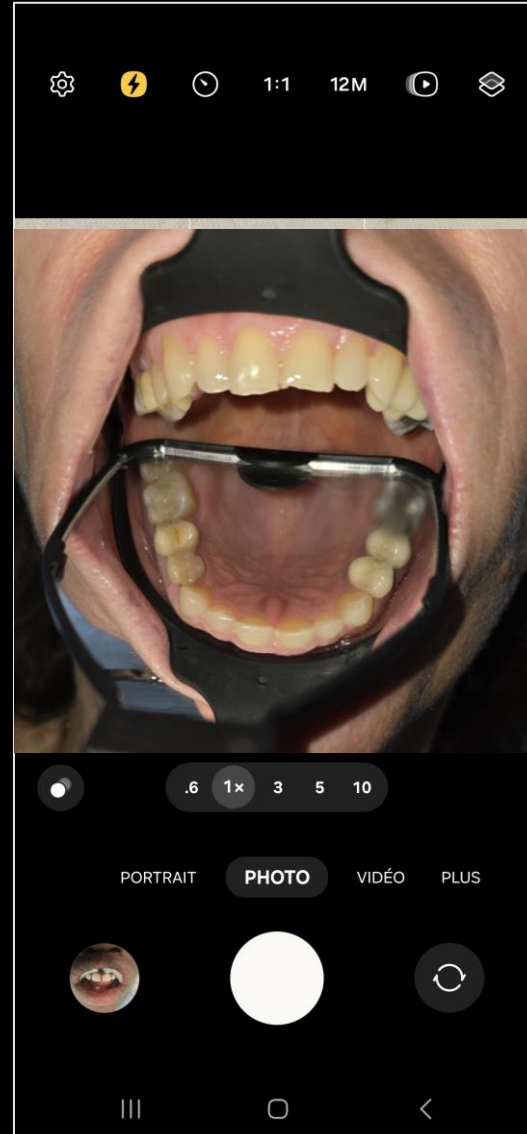


Se mettre en 1 : 1
C'est le carré, afin de bien
être focaliser sur la bouche
et pas le reste du visage qui pourrait permettre
l'identification du patient



Optimiser la photo intraorale



Mais au cas où !

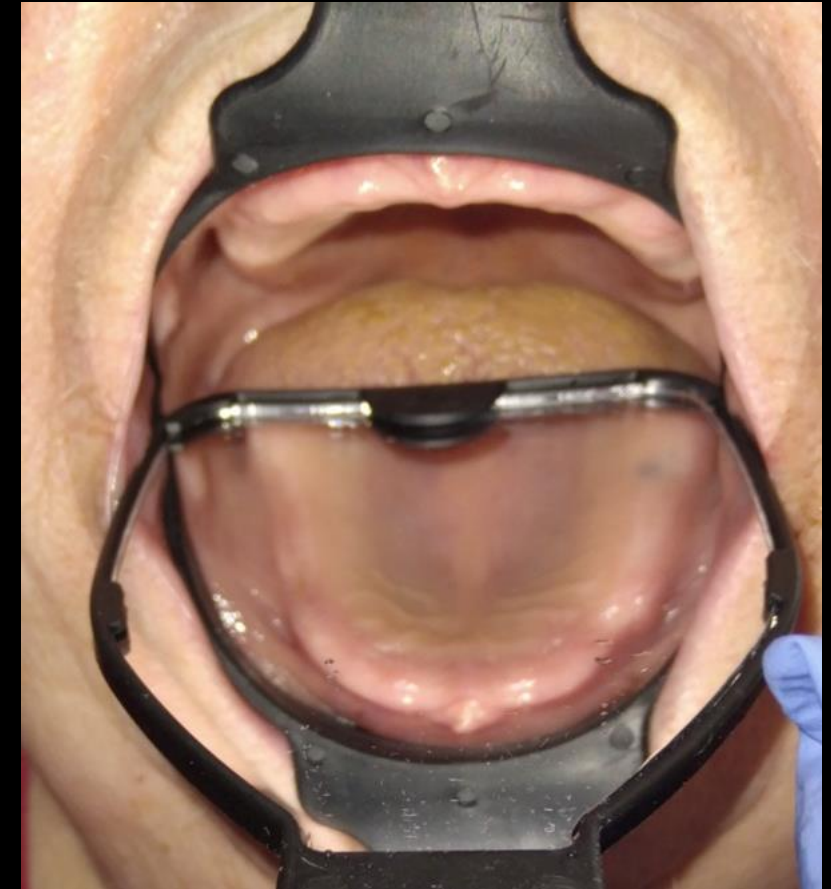

Le miroir Odontoscope est en plastique afin d'éviter la formation de buée.

17:00 72

staging.kweetix.com/Odontoscope

ODONTOSCOPE

Photos intraorales ?

Arcade supérieure

Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Arcade inférieure

Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Langue

Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Muqueuses

Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Lèvres ou joues selon la pertinence

Photos prothèses dentaires ?

☐ Le patient porte une prothèse supérieure

☐ Le patient porte une prothèse inférieure



17:00

72

staging.kweetix.com/Odont

ODONTOSCOPE



Photos intraorales ?

Arcade supérieure

Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Arcade inférieure

Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Langue

Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Muqueuses

Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Lèvres ou joues selon la pertinence

Photos prothèses dentaires ?

- ☐ Le patient porte une prothèse supérieure
- ☐ Le patient porte une prothèse inférieure



© Dr Simon Benoliel

17:00

72

staging.kweetix.com/Odontc

ODONTOSCOPE



Photos intraorales ?

Arcade supérieure

Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Arcade inférieure

Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Langue

Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser


Muqueuses

Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Lèvres ou joues selon la pertinence

Photos prothèses dentaires ?

- ☐ Le patient porte une prothèse supérieure
- ☐ Le patient porte une prothèse inférieure

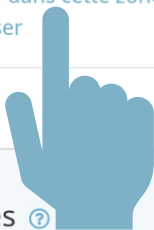

© Dr Simon Benoist

17:00

72

staging.kweetix.com/Odontc

ODONTOSCOPE



Photos intraorales ?

Arcade supérieure

 Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Arcade inférieure

 Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Langue

 Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser


Muqueuses

 Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Lèvres ou joues selon la pertinence

Photos prothèses dentaires ?

- ☐ Le patient porte une prothèse supérieure
- ☐ Le patient porte une prothèse inférieure

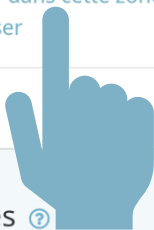

© Dr Simon Bendjel

12:58

staging.kweetix.com/Odontoscope

ODONTOSCOPE

Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Lèvres ou joues selon la pertinence

Photos prothèses dentaires

☒

Le patient porte une prothèse supérieure

Prothèse supérieure extrados

Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Prothèse supérieure intrados

Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

☐

Le patient porte une prothèse inférieure

Pour son hygiène bucco-dentaire


☒

Le patient est autonome

☐Le patient n'est pas autonome

Téléexpertise

☐Le demandeur souhaite que son dossier soit examiné par un expert dentaire

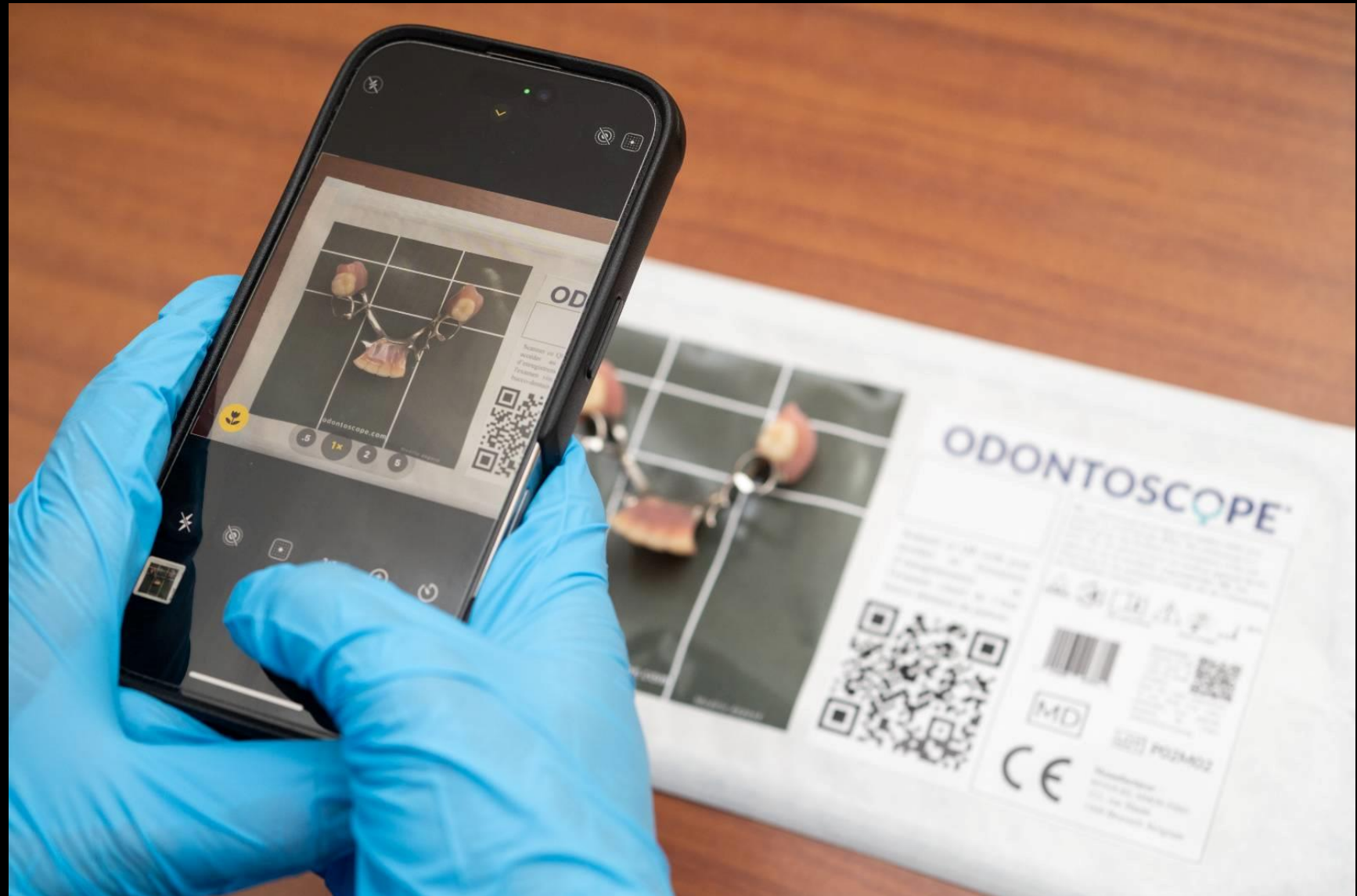

17:00  72

🏠 staging.kweetix.com/Odontoscope 12

ODONTOSCOPE

Photos prothèses dentaires ?

☒ Le patient porte une prothèse supérieure

Prothèse supérieure extrados

 Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Prothèse supérieure intrados

 Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

☒ Le patient porte une prothèse inférieure

Prothèse inférieure extrados

 Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Prothèse inférieure intrados

 Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser

Pour son hygiène bucco-dentaire

☒ Le patient est autonome


☐ Le patient n'est pas autonome

Guides



Comment prendre une photo de prothèse dentaire

© Dr Simon Benoliel

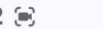11:42  87

ODONTOSCOPE

Accueil / Aide / Photos prothèses dentaires

Photos prothèses dentaires

Standardisation de la photographie des prothèses dentaires

Afin de **compléter l'examen visuel bucco-dentaire** chez une personne âgée porteuse de prothèses dentaires, nous avons intégré un **cadre de photographie dédié** directement sur l'emballage de l'Odontoscope®.

Ce cadre permet de **standardiser la prise de vue des prothèses dentaires amovibles** en photographiant distinctement leurs **deux faces** :

- **l'intrados** : la face interne, en contact avec la muqueuse buccale,
- **l'extrados** : la face externe, du côté des dents.

L'objectif est de faciliter une documentation précise, comparable et exploitable en téléexpertise.



III ○ <



Pour son hygiène bucco-dentaire

- ☒ Le patient est autonome
- ☐ Le patient n'est pas autonome

Téléexpertise

- ☐ Je demande l'analyse de cet examen bucco-dentaire par un dentiste
- ☒ Je réalise moi-même l'analyse de cet examen bucco-dentaire

Analyse de l'état bucco-dentaire

- ☐ Satisfaisant ?
- ☐ A surveiller ?
- ☐ A prendre en charge ?
- ☐ Non évaluable ?

Évaluation de l'hygiène bucco-dentaire

- ☐ Satisfaisante ?
- ☐ A améliorer ?
- ☐ A prendre en charge ?
- ☐ Non évaluable ?

Commentaires et recommandations



4. Préciser si le patient réalise lui-même son hygiène bucco-dentaire



Le patient est autonome



Le patient n'est pas autonome



Evaluation Clinique et Suivi par le personnel de soins formé

Une fois l'examen terminé, vous avez le choix de cocher « demande de téléexpertise » et le formulaire sera alors transmis au dentiste pour analyse. Ou bien de réaliser vous-même cette analyse car vous êtes formé pour cela.

☒ *Je demande l'analyse de cet examen bucco-dentaire par un dentiste*

11:29 91

app.odontoscope.com/f

< Formulaire d'analyse ✓

Pour son hygiène bucco-dentaire

☒ Le patient est autonome
☐ Le patient n'est pas autonome

Téléexpertise

☐ Je demande l'analyse de cet examen bucco-dentaire par un dentiste
☐ Je réalise moi-même l'analyse de cet examen bucco-

1

Analyse de l'état bucco-dentaire

☐ Satisfaisant ?
☐ A surveiller ?
☐ A prendre en charge ?
☐ Non évaluable ?

Évaluation de l'hygiène bucco-dentaire

☐ Satisfaisante ?
☐ A améliorer ?
☐ A prendre en charge ?
☐ Non évaluable ?

Commentaires et recommandations

11:29 91

app.odontoscope.com/f

< Formulaire d'analyse ✓

Pour son hygiène bucco-dentaire

☒ Le patient est autonome
☐ Le patient n'est pas autonome

Téléexpertise

☒ Je demande l'analyse de cet examen bucco-dentaire par un dentiste
☐ Je réalise moi-même l'analyse de cet examen bucco-dentaire

☐ J'ai lu et j'accepte la politique de [protection de la vie privée](#),
inscrivant mon droit d'accéder à mes données, de les rectifier, de les
supprimer et de m'opposer à leur traitement. J'accepte également
que les images transmises puissent être utilisées, de manière
à améliorer la qualité du service

2

(*) Champ requis

BILAN BUCCO-DENTAIRE ODONTOSCOPE

Institution : Notre foyer

Patient N° NISS Examen du 19/03/2025 10:58

Description de la plainte ou de son suivi

Arcade sup Arcade inf Langue Lèvres

Prothese sup extrados Prothese sup intrados Prothese inf extrados Prothese inf intrados

Etat bucco-dentaire : satisfaisant Hygiène bucco-dentaire : satisfaisante

le patient est autonome

Commentaires et recommandations
Aucune plainte, très bon état bucco-dentaire, surveiller l'hygiène de la langue.

Analysé par Benoit Logopède Prochain examen de suivi dans l'année

Si l'état et l'hygiène bucco-dentaire sont "satisfaisants" : réaliser un examen de contrôle du patient dans l'année. Si l'état ou l'hygiène est "à surveiller" ou "à améliorer" : prévoir un prochain examen de suivi dans les 6 mois. Si l'état ou l'hygiène est "à prendre en charge" : prévoir le prochain examen dans les 3 mois qui suivent sa prise en charge.

**Vous recevrez le
rapport sous 24 heures**

Evaluation Clinique et Suivi par le personnel de soins formé

Une fois l'examen terminé, vous avez le choix de cocher « demande de téléexpertise » et le formulaire sera alors transmis au dentiste pour analyse. **Ou bien de réaliser vous-même cette analyse car vous êtes formé pour cela.**

☒ *Je réalise moi-même l'analyse de cet examen bucco-dentaire*

13:19

84

< Formulaire d'analyse

✓

Téléexpertise

☐ Je demande l'analyse de cet examen bucco-dentaire par un dentiste

☒ Je réalise moi-même l'analyse de cet examen bucco-dentaire

Analyse de l'état bucco-dentaire

☐ Satisfaisant ?

☒ A surveiller ?

☐ L'état des dents

☐ L'état des gencives

☐ L'état de la langue

☐ L'état des muqueuses

☐ L'état des prothèses

☐ A prendre en charge ?

☐ Non évaluable ?

Évaluation de l'hygiène bucco-dentaire

☐ Satisfaisante ?

☒ A améliorer ?


☐ L'hygiène des dents-gencives

☐ L'hygiène de la langue

☐ L'hygiène des prothèses

☐ A prendre en charge ?

☐ Non évaluable ?

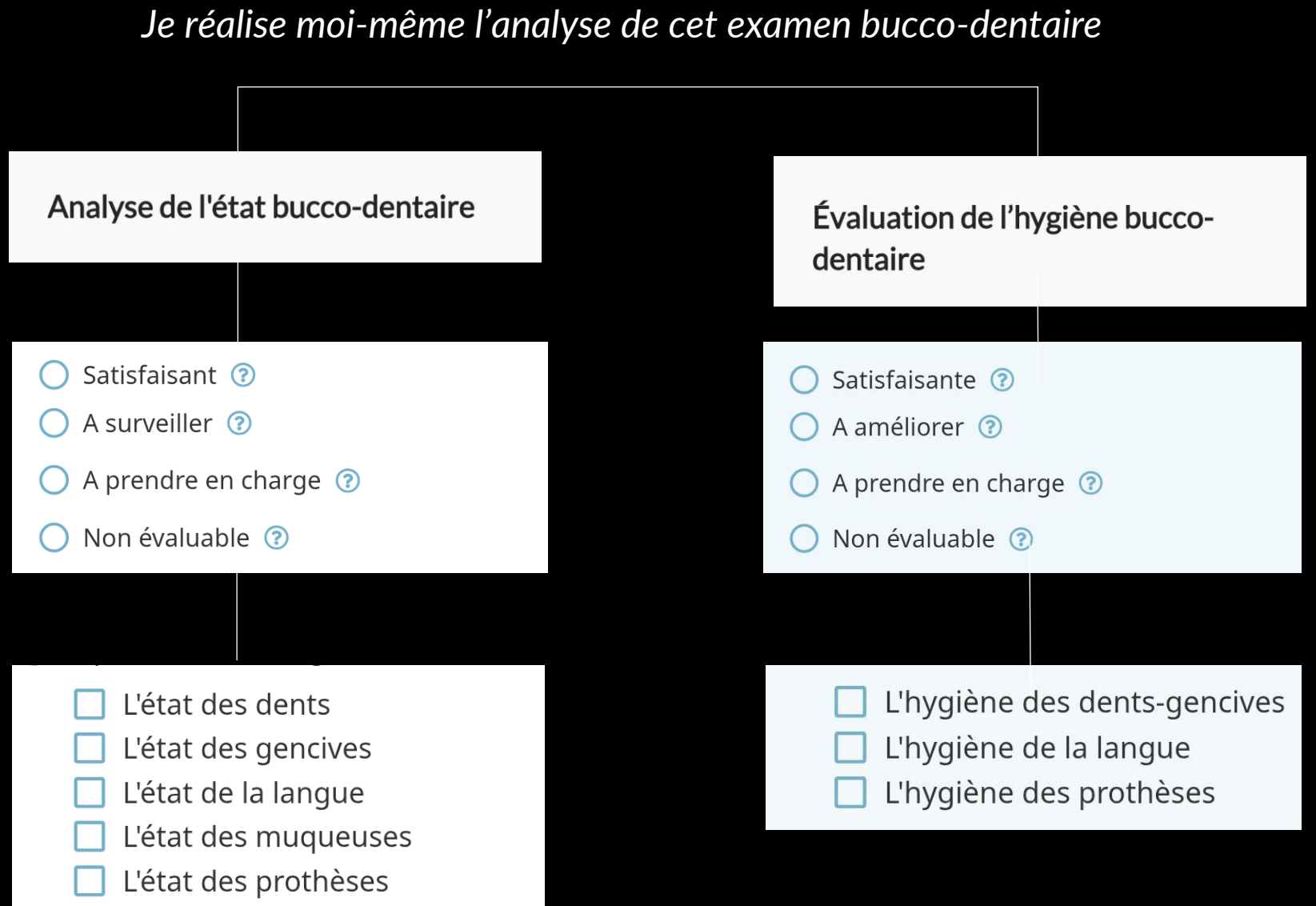

10:24

56

ODONTOSCOPE

Analyse de l'état bucco-dentaire

☒ Satisfaisant ?

☐ A surveiller ?

☐ A prendre en charge ?

☐ Non évaluable ?

Évaluation de l'hygiène bucco-dentaire

☒ Satisfaisante ?

☐ A améliorer ?

☐ A prendre en charge ?

☐ Non évaluable ?

Commentaires et recommandations

Commentaire

Aucune plainte, très bon état bucco-dentaire, surveiller l'hygiène de la langue.

Prochain examen de suivi dans

☐ Les 3 mois

☐ Les 6 mois

☒ Les 12 mois

Analysé par

Bilan bucco-dentaire à verser au DIS du résident

BILAN BUCCO-DENTAIRE

ODONTOSCOPE

Institution : Notre foyer

Patient

N° NISS

Examen du 19/03/2025 10:58

Description de la plainte ou de son suivi

Arcade sup

Arcade inf

Langue

Lèvres

Prothese sup extrados

Prothese sup intrados

Prothese inf extrados

Prothese inf intrados

Etat bucco-dentaire : satisfaisant

Hygiene bucco-dentaire : satisfaisante

le patient est autonome

Commentaires et recommandations

Aucune plainte, très bon état bucco-dentaire, surveiller l'hygiène de la langue.

Analysé par Benoliel Logopède

Prochain examen de suivi dans l'année

Si l'état et l'hygiène bucco-dentaire sont "satisfaisant" : réaliser un examen de contrôle du patient dans l'année. Si l'état ou l'hygiène est "à surveiller" ou "à améliorer" : prévoir un prochain examen de suivi dans les 6 mois. Si l'état ou l'hygiène est "à prendre en charge" : prévoir le prochain examen dans les 3 mois qui suivent sa prise en charge.

Vous recevez le rapport au format PDF immédiatement par E-mail

© fsbd Dr Simon Benoliel

10:24

56

ODONTOSCOPE

Analyse de l'état bucco-dentaire

☐

Satisfaisant ?

☐

A surveiller ?

☐

A prendre en charge ?

☐

Non évaluable ?

Évaluation de l'hygiène bucco-dentaire

☐

Satisfaisante ?

☐

A améliorer ?

☐

A prendre en charge ?

☐

Non évaluable ?

Commentaires et recommandations

Commentaire

Prochain examen de suivi dans

☐

Les 3 mois

☐

Les 6 mois

☐

Les 12 mois

Analysé par

III

O

<

Guides



Comment analyser l'état bucco-dentaire

Dans l'analyse de l'état bucco-dentaire vous devrez choisir parmi les 4 possibilités proposées. Des (?) sont des aides avec des exemples photos.

© Dr Simon Benoliel

12:02

87

staging.kweetix.com/odonto

ODONTOSCOPE


Accueil / Aide / Etat bucco-dentaire à prendre en charge


Etat bucco-dentaire à prendre en charge

Etat des dents



Dent très mobile

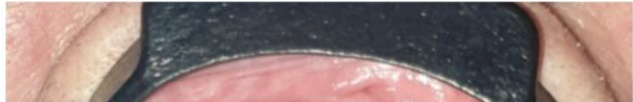

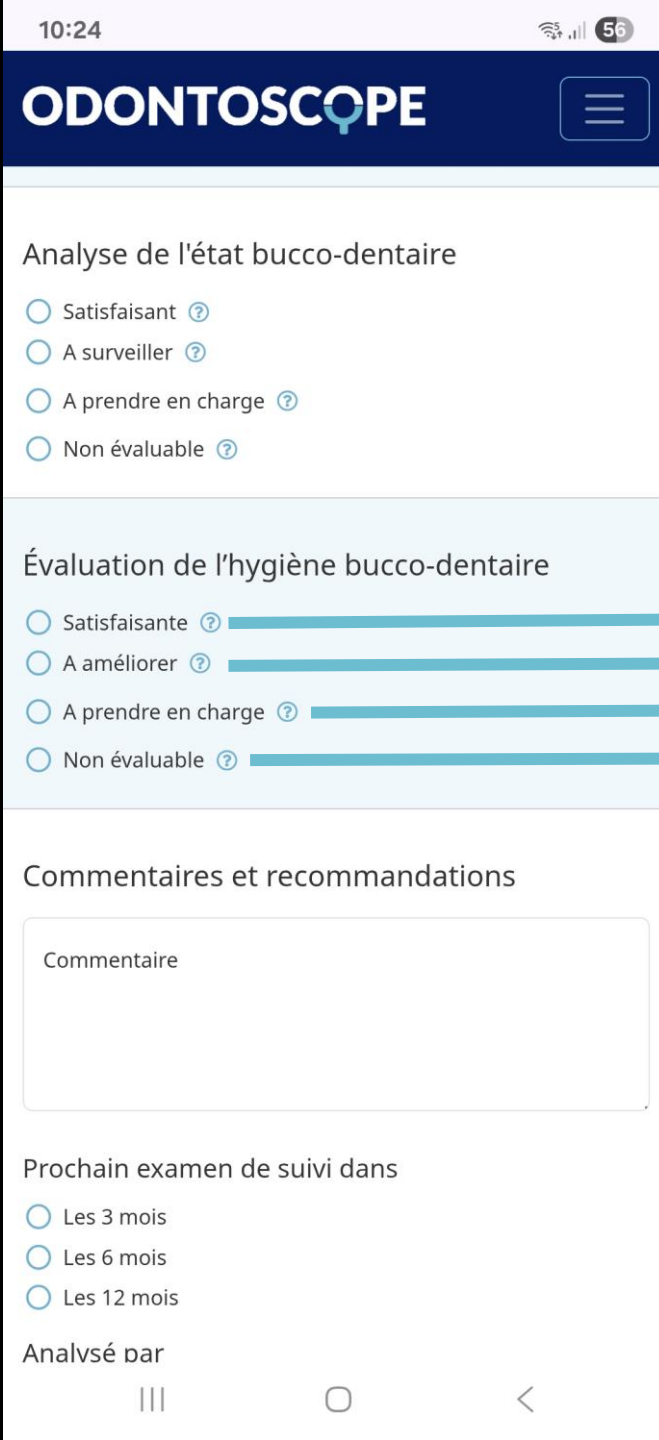


Guides

Comment évaluer l'hygiène bucco-dentaire



Dans l'évaluation de l'hygiène bucco-dentaire vous devrez choisir parmi les 4 possibilités proposées. Des (?) sont des aides avec des exemples photos.

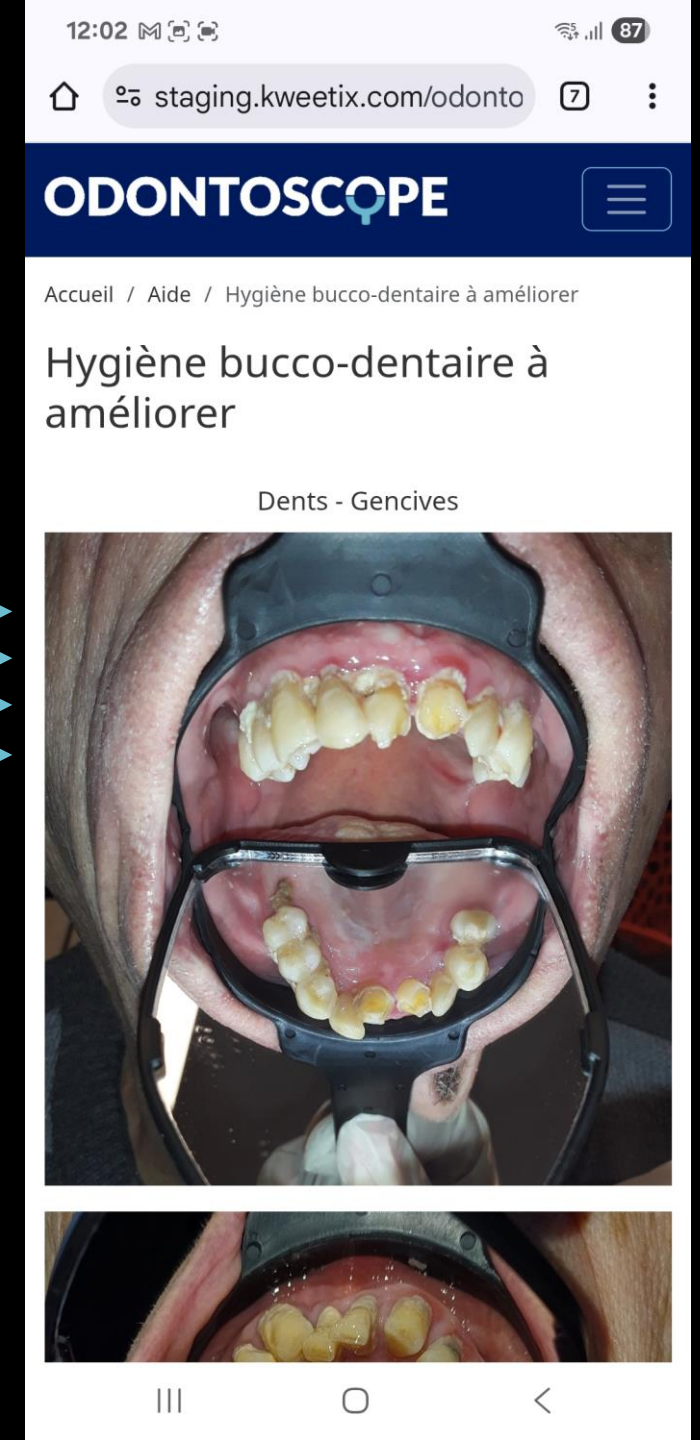

11:28

app.odontoscope.com/f

< Formulaire d'analyse

Évaluation de l'hygiène bucco-dentaire

☐ Satisfaisante ?

☐ A améliorer ?

☐ A prendre en charge ?

☐ Non évaluable ?

Commentaires et recommandations

Commentaire

Prochain examen de suivi dans ?

☐ Les 3 mois

☐ Les 6 mois

☐ Les 12 mois

☐ J'ai lu et j'accepte la politique de [protection de la vie privée](#), incluant mon droit d'accéder à mes données, de les rectifier, de les supprimer et de m'opposer à leur traitement. J'accepte également que les images transmises puissent être utilisées, de manière anonyme, pour améliorer la qualité du service

(*) Champ requis

Guides



11:32

app.odontoscope.com/f

Prochain examen de suivi

SUIVI BUCCO-DENTAIRE AVEC L'ODONTOSCOPE®

Le suivi régulier de la santé bucco-dentaire est essentiel pour préserver le confort, la qualité de vie et la sécurité des résidents en maison de repos et de soins (MR-S) ou en EHPAD. Grâce à l'Odontoscope®, à l'évaluation réalisée par le personnel de soins et à la téléexpertise bucco-dentaire, chaque résident bénéficie d'un protocole clair et adapté à son état.

Fréquence du suivi selon l'évaluation

Le rythme de suivi est défini en fonction **de l'état bucco-dentaire** et **de l'évaluation de l'hygiène bucco-dentaire** :

Suivi à 12 mois





- **Condition** : l'état bucco-dentaire **ET** l'évaluation de l'hygiène bucco-dentaire sont **satisfaisants**.
- **Objectif** : maintien de la santé bucco-dentaire et prévention à long terme.

Suivi à 6 mois



- **Condition** : l'état bucco-dentaire est **à surveiller** **OU** l'évaluation de l'hygiène bucco-dentaire est **à améliorer**.
- **Objectif** : renforcer la prévention et intervenir rapidement en cas d'évolution défavorable.

Suivi à 3 mois

Continuer

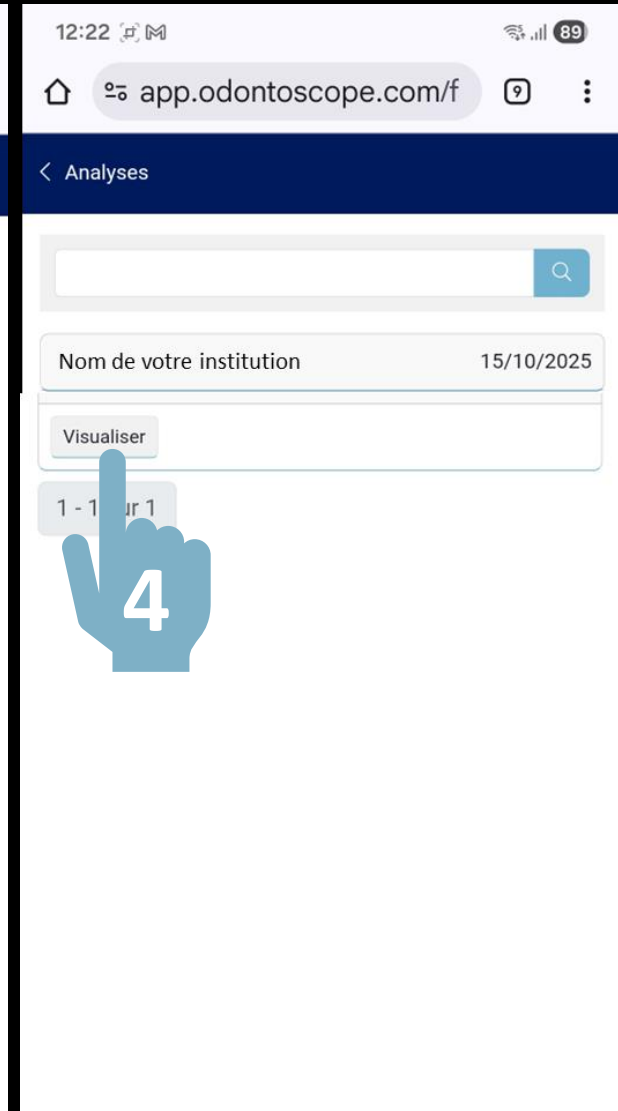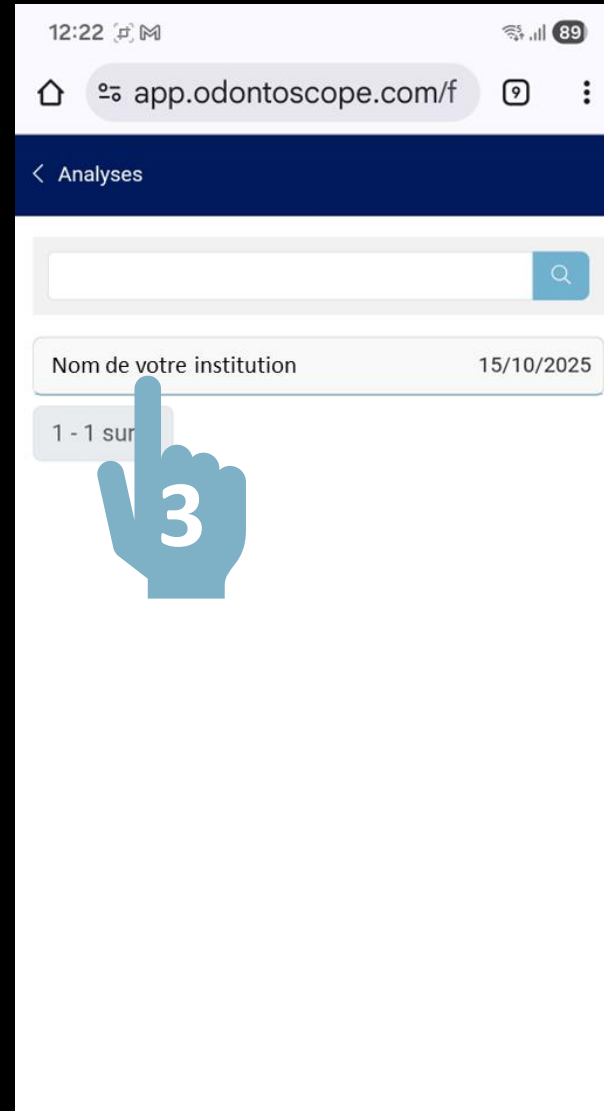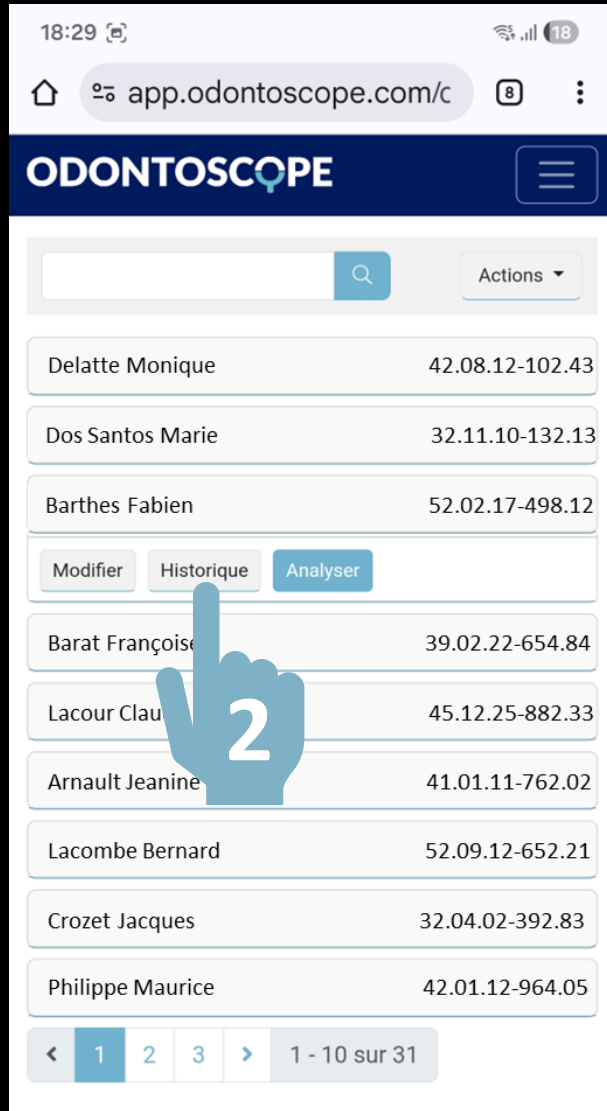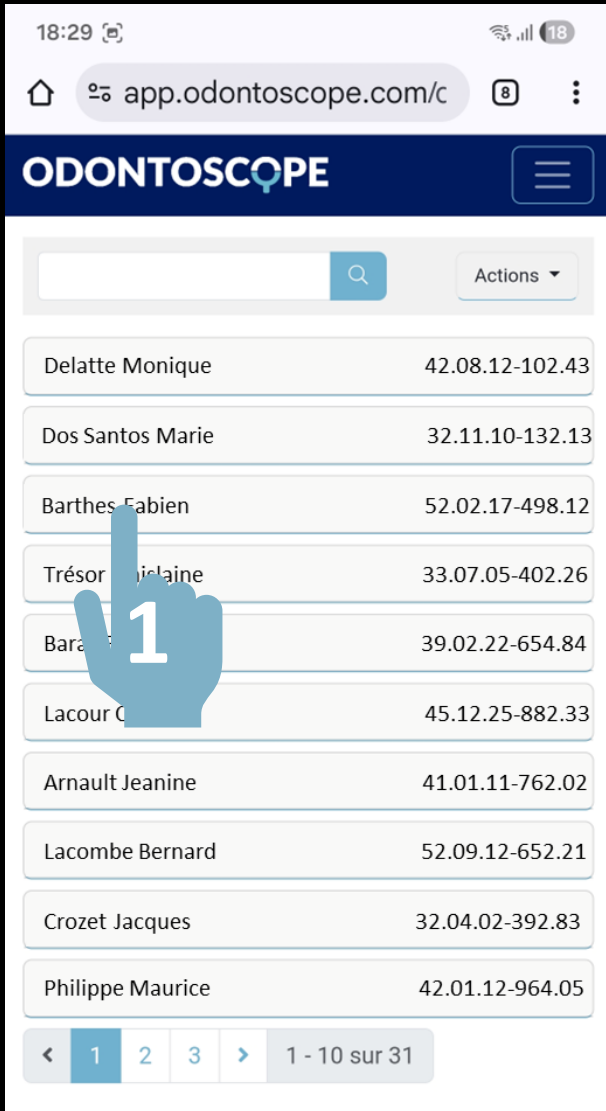

Retrouver l'historique d'examens bucco-dentaires du résident

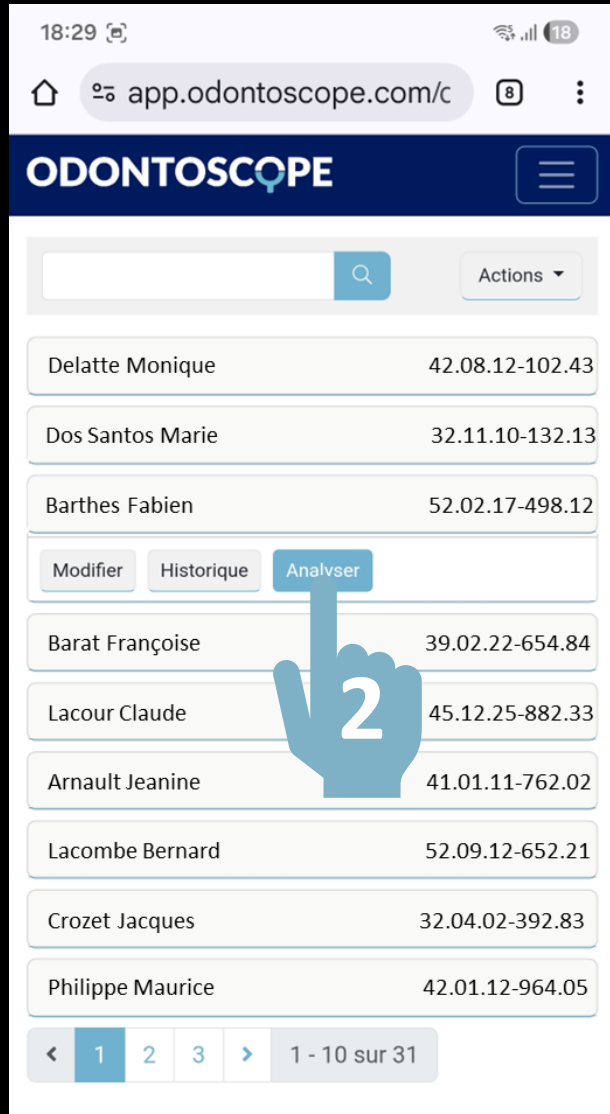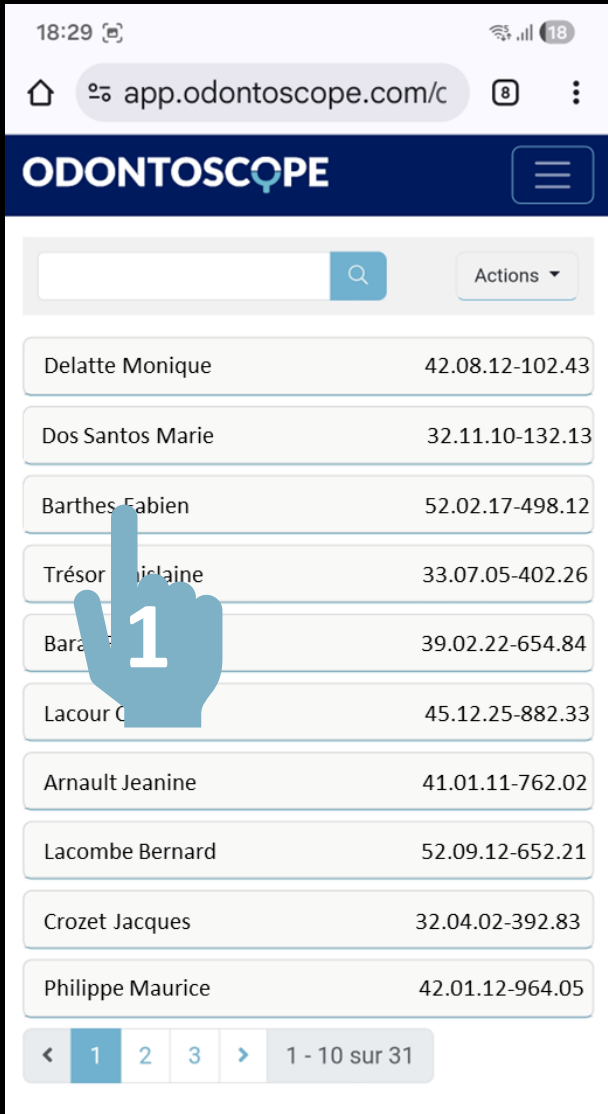

18:21 app.odontoscope.com/f

< Formulaire d'analyse ✓

Odontoscope® System

Institution *

Nom:

Patient *

Nom:

Prénom:

N° NISS:

Motif de l'examen bucco-dentaire

- ☒ Admission du résident
- ☐ Plainte du résident
- ☐ Altération ou dégradation de l'état bucco-dentaire du résident, à la suite d'une chute ou d'une hospitalisation
- ☐ Contrôle à 3 - 6 - 12 mois

Réaliser un examen bucco-dentaire d'un résident déjà inscrit

Application **ODONTOSCOPE®**



See instructions

Lire attentivement toutes les informations et précautions contenues dans ce manuel. Avant d'utiliser l'application Odontoscope®, assurez-vous d'avoir bien compris la finalité de l'application et ses limitations. Si vous avez des questions, veuillez contacter Odontoscope®. Au cours de l'utilisation du service, l'assistance technique et l'assistance médicale nécessaires seront fournies. En cas de défaillance ou de problème dans l'application, vous pourrez contacter Odontoscope® par le biais de la [messagerie de l'application](#)

Décembre 2025



Odontoscope®



Version 1.1



Marque CE développée en conformité avec le règlement (UE) 2017/745 – MDR pour les dispositifs de classe I



Veuillez lire les instructions d'utilisation fournies avec ce logiciel



Manufacturer
BENOLIEL SIMON FSBD
322, rue Haute
1000 Brussels Belgium